

Русский



Контрольный Раствор Глюкозы В Крови Инструкция

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Контрольный Раствор Keto-Mojo™ содержит известную концентрацию глюкозы. Он используется для подтверждения того, что тест-полоски для определения глюкозы в крови Keto-Mojo™ и многофункциональный глюкометр Keto-Mojo™ GKI работают правильно и что вы выполняете тест правильно. Необходимо выполнить тест для контроля качества:

- Минимум один раз в неделю
- Когда открываете новую коробку с тест-полосками
- Когда хотите проверить глюкометр и тест-полоски
- Если ваши тест-полоски хранились в экстремальных условиях температуры или влажности
- После очистки глюкометра
- Если Вы уронили глюкометр
- Результаты теста не совпадают с тем, как Вы себя чувствуете

Два уровня контрольных растворов предоставлены, контрольный раствор нормального уровня (**CTRL 2**) и контрольный раствора высокого уровня (**CTRL 3**). Контрольный Раствор **CTRL 2** достаточно для большинства потребностей самотестирования. Свяжитесь с **Keto-Mojo** для получения информации о покупке контрольного раствора.

СОСТАВ

Контрольный раствор нормального уровня "Normal" содержит менее 0,2% глюкозы (активный ингредиент), а контрольный раствор высокого уровня "High" содержит менее 0,3% глюкозы (активный ингредиент), два уровня контрольных растворов с консервантами в смеси на водной основе.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

- Храните контрольный раствор при температуре от 2°C до 30°C. (36-86°F).
- Не замораживайте и не храните в холодильнике,
- Если контрольный раствор холодный, не используйте до тех пор, пока он не нагреется до комнатной температуры.
- Используйте до истечения срока годности, который указан на бутылке.
- Примечание:** все даты истечения срока действия печатаются в формате год-месяц. 2021-01 означает январь 2021.
- Контрольный раствор истекает через 6 месяцев после первого открытия бутылки. Запишите эту дату сброса на этикетке бутылки.

Примечание: отбросьте просроченный контрольный раствор согласно местным регулировкам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для *in vitro* диагностической пользы. Контрольный раствор для испытывать только вне тела. Не глотать и не вводить. Для самотестирования и профессионального использования.
- Хорошо взболтать перед использованием.
- Тестируя контрольных растворов должны быть точными только при испытании в диапазоне температуры от 10 до 40°C (50-104°F).
- Диапазон контроли, показанные на коробке или этикетках тест-полосок, не являются рекомендуемым диапазоном для вашего уровня глюкозы в крови.
- Ваши личные целевые диапазоны глюкозы в крови должны быть определены вашим врачом диабета.
- Не прикасайтесь концом тест-полоски к флякону контрольного раствора. Это может привести к попаданию загрязняющих веществ в флякон контрольного раствора. Не используйте раствор, если упаковка повреждена.
- Используйте только контрольные растворы бренда **Keto-Mojo™** с многофункциональным глюкометром **Keto-Mojo™ GKI** и тест-полосками бренда **Keto-Mojo™**.

МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ

- Контрольные Раствор
- Инструкция
- Глюкометр
- Тест-полоски

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Включите глюкометр, вставив новую тест-полоску. Обратитесь к руководству пользователя о деталях на операцию глюкометра.
2. Тщательно взболтать флякон контрольного раствора. Аккуратно сожмите флякон контрольного раствора и выбросьте первую каплю. Если наконечник засоряется, осторожно коснитесь его на чистой твердой поверхности, снова взболтать и используйте. Тестируйте сразу после того, как контрольный раствор отлся.
3. Выдавите вторую маленькую каплю на чистой неабсорбирующей поверхности. Дотроньтесь кончиком образца тест-полоски до капли контрольного раствора, пока глюкометр не подаст звуковой сигнал.

Примечание: Не наносите контрольный раствор на тест-полоску **непосредственно из флякона**. Если образец контрольного раствора не полностью заполняет окно проверки, не добавляйте вторую каплю. Выбросьте тест-полоску и начните с новой тест-полоской.

4. Прочитать результат на дисплее глюкометра после 5 секунд.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты теста контрольного раствора должны находиться в пределах диапазона контроля. Диапазоны для двух уровней (**CTRL 2** и **CTRL 3**) указаны на коробке или этикетках тест-полосок. Для подтверждения результатов, тестируя контрольного раствора нормального уровня "Normal" должны находиться в диапазоне **CTRL 2**, и тестируя контрольного раствора высокого уровня "High" должны находиться в диапазоне **CTRL 3**. Если результаты тестируя контрольного раствора попадают в указанный диапазон контроля, это означает, что ваша система мониторинга глюкозы в крови работает правильно, и вы выполняете процедуру правильно.

- Если результаты тестируя контрольного раствора не попадают в соответствующий диапазон:
- Проверьте срок годности тест-полоски и контрольного раствора. Убедитесь, что флякон контрольного раствора не открывалась более 6 месяцев. Выбросьте все просроченные тест-полоски или контрольный раствор.
 - Подтвердите, что температура, в которой вы тестируете, находится между 10 и 40°C (50-104°F).
 - Убедитесь, что фляконы контрольного раствора плотно закрыты.
 - Подтвердите, что вы используете контрольный раствор бренда **Keto-Mojo™**.
 - Убедитесь, что вы правильно выполнили процедуру тестируя.

После проверки всех условий, перечисленных выше, повторите тестируя контрольного раствора с новой тест-полоской. Если ваши результаты все еще падают не в диапазонах указанных на коробке или этикетках набора, то ваш глюкометр может не работать как следует. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** данную систему для анализа крови. Обратитесь к **Keto-Mojo** за поддержкой.

Для получения более подробной информации инструкции смотрите руководство пользователя, прилагаемое к прибору. Для получения ответов дополнительных вопросов или проблем с этим продуктом, пожалуйста, свяжитесь с **Keto-Mojo** для поддержки.

ИНДЕКС СИМВОЛОВ

	Ознакомьтесь с инструкцией по использованию		Использовать до		Каталожный номер		Только для <i>in vitro</i> диагностики (вне тела человека)
	Номер серии		Контрольный диапазон		Производитель		2°C-30°C Temperaturange Grenzen
	Уполномоченный представитель		Использовать до 6 месяцев с момента открытия				



Manufactured For:
Keto-Mojo Europe BV
Ground, 1st, 2nd and 3rd floor
Joop Geesinkweg 901-999
Amsterdam-Duivendrecht
1114 AB, Netherlands

Manufactured By:
VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
Level 2, Block 2, 146 East Chaofeng Rd.,
Yuhang Economic Development Zone,
Hangzhou, 311100, China



EC Landlink GmbH
Dorfstrasse 2/4
Emmendingen, Germany
Tel / Fax: 0049 7641 9626855
E-mail: info@landlink.eu