

### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Контрольный Раствор **Keto-Mojo™** содержит известную концентрацию кетона. Он используется для подтверждения того, что тест-полоски для определения кетона в крови **Keto-Mojo™** и многофункциональный глюкометр **Keto-Mojo™ GKI** работают правильно и что вы выполняете тест правильно.

Необходимо выполнить тест для контроля качества:

- Минимум один раз в неделю
- Когда открываете новую коробку с тест-полосками
- Когда хотите проверить глюкометр и тест-полоски
- Если ваши тест-полоски хранились в экстремальных условиях температуры или влажности
- После очистки глюкометра
- Если Вы уронили глюкометр
- Результаты теста не совпадают с тем, как Вы себя чувствуете

Два уровня контрольных растворов предоставлены, контрольный раствор нормального уровня (**CTRL 2**) и контрольный раствор высокого уровня (**CTRL 3**). Контрольный Раствор **CTRL 2** достаточно для большинства потребностей самотестирования. Свяжитесь с **Keto-Mojo** для получения информации о покупке контрольного раствора.

### COMPOSITION

Контрольный раствор нормального уровня "Normal" содержит менее 0,05% кетона (активный ингредиент), а контрольный раствор высокого уровня "High" содержит менее 0,10% кетона (активный ингредиент), два уровня контрольных растворов с консервантами в смеси на водной основе.

### ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

- Храните контрольный раствор при температуре от 2°C до 30°C. (36-86°F).
- Не замораживайте и не храните в холодильнике.
- Если контрольный раствор холодный, не используйте до тех пор, пока он не нагреется до комнатной температуры.
- Используйте до истечения срока годности, который указан на бутылке.  
**Примечание:** все даты истечения срока действия печатаются в формате год-месяц. 2021-01 означает январь 2021.
- Контрольный раствор истекает через 6 месяцев после первого открытия бутылки. Запишите эту дату сброса на этикетке бутылки.  
**Примечание:** отбросьте просроченный контрольный раствор согласно местным регуляторам.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для *in vitro* диагностической пользы. Контрольный раствор для испытывать только вне тела. Не глотать и не вводить. Для самотестирования и профессионального использования.
- Хорошо взболтать перед использованием.
- Тестирования контрольных растворов должны быть точными только при испытании в диапазоне температуры от 15 до 40°C (59-104°F).
- Диапазоны контроля, показанные на коробке или этикетках тест-полосок, не являются рекомендуемым диапазоном для вашего уровня глюкозы в крови.
- Ваши личные целевые диапазоны глюкозы в крови должны быть определены вашим врачом диабета.
- Не прикасайтесь концом тест-полоски к флакону контрольного раствора. Это может привести к попаданию загрязняющих веществ в флакон контрольного раствора. Не используйте раствор, если упаковка повреждена.
- Используйте только контрольные растворы бренда **Keto-Mojo™** с многофункциональным глюкометром **Keto-Mojo™ GKI** и тест-полосками для определения кетона в крови **Keto-Mojo™**.

### МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ

- Контрольные Раствор
- Инструкция

### НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

- Глюкометр
- Тест-полоски

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Включите глюкометр, вставив новую тест-полоску. Обратитесь к руководству пользователя о деталях на операцию глюкометра.
2. Тщательно взболтать флакон контрольного раствора. Аккуратно сожмите флакон контрольного раствора и выбросьте первую каплю. Если наконечник засоряется, осторожно коснитесь его на чистой твердой поверхности, снова взболтать и используйте. Тестируете сразу после того, как контрольный раствор отжался.
3. Выдавите вторую маленькую каплю на чистой неабсорбирующей поверхности. Дотроньтесь кончиком образца тест-полоски до капли контрольного раствора, пока глюкометр не подаст звуковой сигнал.

**Примечание:** Не наносите контрольный раствор на тест-полоску непосредственно из флакона. Если образец контрольного раствора не полностью заполняет окно проверки, не добавляйте вторую каплю. Выбросьте тест-полоску и начните с новой тест-полоской.

4. Прочитать результат на дисплее глюкометра после 10 секунд.

### ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты теста контрольного раствора должны находиться в пределах диапазона контроля. Диапазоны для двух уровней (**CTRL 2** и **CTRL 3**) указаны на коробке или этикетках тест-полосок. Для подтверждения результатов, тестирования контрольного раствора нормального уровня "Normal" должны находиться в диапазоне **CTRL 2**, и тестирования контрольного раствора высокого уровня "High" должны в диапазоне **CTRL 3**. Если результаты тестирования контрольного раствора попадают в указанный диапазон контроля, это означает, что ваша многофункциональная система мониторинга **Keto-Mojo™ GKI** в работает правильно, и вы выполняете процедуру правильно.

Если результаты тестирования контрольного раствора не попадают в соответствующий диапазон:

- Проверьте срок годности тест-полоски и контрольного раствора. Убедитесь, что флакон контрольного раствора не открывался более 6 месяцев. Выбросьте все просроченные тест-полоски или контрольный раствор.
- Подтвердите, что температура, в которой вы тестируете, находится между 15 и 40°C (59-104°F).
- Убедитесь, что флаконы контрольного раствора плотно закрыты.
- Подтвердите, что вы используете контрольный раствор кетона в крови **Keto-Mojo™**.
- Убедитесь, что вы правильно выполнили процедуру тестирования.

После проверки всех условий, перечисленных выше, повторите тестирование контрольного раствора с новой тест-полоской. Если ваши результаты все еще падают не в диапазонах указанные на коробке или этикетках набора, то ваш глюкометр может не работать как следует. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** данную систему для анализа крови. Обратитесь к **Keto-Mojo** за поддержкой.

Для получения более подробной информации инструкции смотрите руководство пользователя, прилагаемое к прибору. Для получения ответов дополнительных вопросов или проблем с этим продуктом, пожалуйста, свяжитесь с **Keto-Mojo** для поддержки.

### ИНДЕКС СИМВОЛ

	Ознакомьтесь с инструкцией по пользованию		Использовать до		Каталожный номер		Только для <i>in vitro</i> диагностики (вне тела человека)
	Номер серии		Контрольный диапазон		Производитель		Температурные ограничения
	Уполномоченный представитель			Использовать до 6 месяцев с момента открытия			



**Manufactured For:**  
Keto-Mojo Europe BV  
Ground, 1st, 2nd and 3rd floor  
Joop Geesinkweg 901-999  
Amsterdam-Duivendrecht  
1114 AB, Netherlands

**Manufactured By:**  
VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.  
Level 2, Block 2, 146 East Chaofeng Rd.,  
Yuhang Economy Development Zone,  
Hangzhou, 311100, China



 Landlink GmbH  
Dorfstrasse 2/4  
Emmendingen, Germany  
Tel / Fax: 0049 7641 9626855  
E-mail: info@landlink.eu