


快速操作指南


vetscan IMAGYST™

01 采集粪便

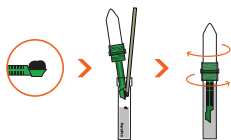


- 用**样品管**的勺子采集 1 勺粪便样本 (约 1 克)
- 移去**采样管**管盖
- 用**搅拌棒**将粪便样本移到采样管, 并将粪便样本与管内的漂浮液搅拌均匀
- 将**样品管**旋盖上**采样管**, 直至 2 个管子紧密旋闭

02 准备便样

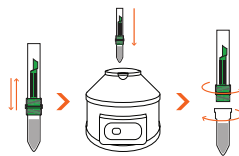

- 摇动紧密旋转后的样本管, 然后将其放入**离心机**中, 注意: 样品管位于下方
- 以 500 RCF 的离心力离心样本 2 分钟
- 取下**采样管**和**勺子**, 弃于废样桶
- 将**样品管**放在托架中


03 将样本添加到载玻片上

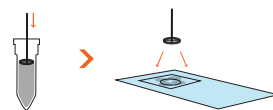


- 将**载玻片**放在**载玻片横框**上, 注意: 条形码和签字侧向上
- 将**移样环**放入样品管中, 使其环端充分接触样品管中顶部的液体
- 将沾满液体的**移样环**放在载玻片目标圆圈的周围, 使其转移到载玻片上
- 再次使用**移样环**从离心管中获取样本, 加样到载玻片。重复 2-4 次

检查清单

检测前, 请确保准备好以下材料:

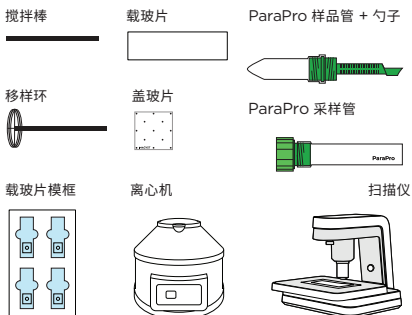


04 放置盖玻片

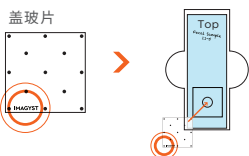

- 取出**盖玻片**, 调整盖玻片方向, 使**盖玻片**上的 IMAGYST 字样位于左下角方向
- 将盖玻片放置于**载玻片横框**中的载玻片目标区域之上

05 开始检测

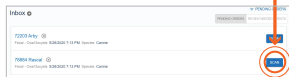


- 在 imagyst 的操作界面中点击**扫描**
- 录入样本信息。如该动物信息已经在其他与 FUSE 连接的系统输入过, 可直接导入相关信息。如无, 则需要添加相关信息, 步骤依次为**添加样本**图标 (+)、输入样本信息、选择**创建**, 选择**扫描**
- 选择**扫描仪**, 并确保托盘已打开 (如有必要, 请选择**打开托盘**)

06 安放并扫描载玻片



- 解锁载玻片托架, 然后将**载玻片** (连同**盖玻片**) 放在载玻片托盘上
- 将载玻片上有标签或文字的一端朝向载玻片托盘的**右侧**, 然后锁紧载玻片托架
- 选择**扫描载玻片**

07 查看扫描结果

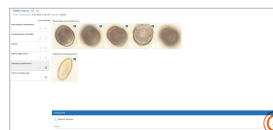

- 打开样本结果, 查看所有捕获的图像, 然后选择要在报告中包括的图像
- 添加备注并选择完成
- 选择**查看报告**, 可打开 PDF 文件查看结果报告或在连接 FUSE 的软件系统中直接查看结果