

# その他のサンプルのタイプ



## 尿沈渣

- ✓ 染色済みの沈渣/濃縮調製 (Diff Quikまたは類似の染色液)
- ✗ Wet Preparation (認められません)
- ✗ 未染色 (認められません)
- ✗ Sedi-Stain染色 (認められません)

## セロハンテープ法による調製

- ✗ 一般的に厚すぎる/透明度が低いいため、十分な評価ができません

## 糞便の細胞診

- ✓ 染色済みのスライド (Diff Quikまたは類似の染色液)
- ✗ グラム染色 (認められません)

## 提供すべき情報

- ✓ 炎症性または他の有核細胞型
- ✓ 細菌/酵母または他の生物の一般的な説明

## 糞便の細胞診

- ✗ 細菌の種類/種の確認
- ✗ グラム陰性およびグラム陽性細菌の評価

## 参考文献

画像：istock 450726311

すべての商標は、別段の定めのない限り、Zoetis Services LLCまたはその関連会社もしくはライセンスの財産です。  
©2023 Zoetis Services LLC.全著作権所有。TI-10149