

OUTROS TIPOS DE AMOSTRA



Sedimento urinário

- ✓ Preparação corada de sedimento (concentrada) (Diff Quik ou semelhante)
- ✗ Preparação húmida (não aceite)
- ✗ Não corada (não aceite)
- ✗ Sedi-Stain (não aceite)

Preparações de fitas

- ✗ Geralmente demasiado espessas ou de reduzida translucidez para uma avaliação adequada

Citologia fecal

- ✓ Lâmina corada (Diff Quik ou semelhante)
- ✗ Coloração de Gram (não aceite)

Informação fornecida

- ✓ Tipos de células inflamatórias ou outras nucleadas
- ✓ Descrição geral de bactérias/leveduras ou outros organismos

Citologia fecal

- ✗ Confirmação de tipos/espécies de bactérias
- ✗ Avaliação de bactérias Gram - versus Gram +

Referências

Imagem: istock 450726311

Todas as marcas comerciais são propriedade da Zoetis Services LLC, de uma empresa coligada ou de uma entidade licenciante, a menos que indicado em contrário. ©2023 Zoetis Services LLC. Todos os direitos reservados. TI-10149