

体液 - CSF

(脑脊液)



需特殊处理

若脑脊液样本不满足以下条件，不可接收

- 可进行细胞离心机/细胞离心涂片器制备
- 可进行血细胞计数器细胞计数（由经过培训的人员手动执行）

若没有血细胞计数器细胞计数和细胞离心机制备，请将脑脊液样本送至参考实验室。

体液样本采集

如果脑脊液样本量足够，应立即分装到 EDTA 管和红顶管中。

细胞离心机制备

细胞离心机（也就是“细胞离心涂片器”）是一种在参考实验室环境中使用的专用离心机，用于将洗涤液等细胞量极低的液体浓缩到玻片的小圆形区域上。该制备技术有助于保持细胞完整性并确保病理学家可对细胞进行评估。

细胞离心机制备

1. 用铅笔标注脑脊液片。
2. 按照细胞离心机制造商的说明准备漏斗、玻片和夹具。
3. 小心地将 200uL 脑脊液滴入漏斗中（最少 100uL）。
4. 按照制造商的说明离心样本。
5. 取出玻片并让其干燥。
6. 染色并封片。

提交时

请包括

- 相关病史
- 体液描述
- 血细胞计数器手动细胞计数（红细胞及白细胞）
- 细胞离心机玻片

扫描时，请确保

- 玻片样本面朝上，朝向扫描仪镜头
- 锁定滑块
- 确保没有物体阻碍扫描仪的移动（包括未在运行的离心机）