


GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA

vetscan IMAGYST™




LISTA DE VERIFICAÇÃO

Garanta que os seguintes materiais estão prontos

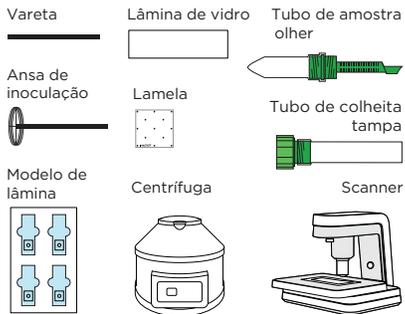


01 FAZER A COLHEITA DA MATÉRIA FECAL

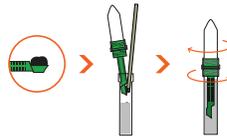


- Desenrosque a **tampa** do **tubo de colheita**
- Adicione 1 colher, cerca de 1 grama, de matéria fecal ao **tubo de colheita**
- Utilize uma **vareta** para retirar a matéria da **colher** e para mexer
- Aperte o **tubo da amostra** no **tubo de colheita**
- Continue a rodar até que os tubos fiquem bem apertados

02 PREPARAR A AMOSTRA FECAL

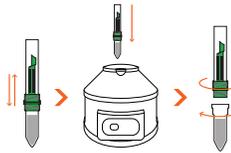


- Agite os **tubos** e coloque-os numa **centrifuga**
- Centrifugue a amostra durante 2 minutos a 500 RCF
- Desenrosque o **tubo de colheita** com a **colher** e deite ambos fora
- Coloque o **tubo da amostra** numa bandeja

03 ADICIONAR AMOSTRA À LÂMINA

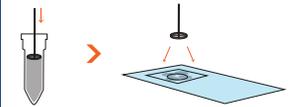

- Coloque a **lâmina de vidro** no **modelo da lâmina** com o nome e o código de barras voltados para cima
- Retire o material da parte superior do **tubo da amostra** utilizando a **ansa de inoculação**
- Coloque 2-4 ansas de matéria fecal na **lâmina de vidro** à volta da extremidade do círculo

04 COLOCAR A LAMELA

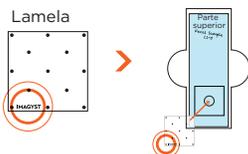

- Oriente a **lamela** para o texto IMAGYST ser legível no canto inferior esquerdo da **lamela**
- Coloque a **lamela** na **lâmina de vidro** sobre a área visada do **modelo da lâmina**

05 INICIAR TESTE



- Selecione **Digitalizar** para a amostra correta; as informações da amostra serão preenchidas automaticamente através de qualquer sistema de software ligado ao FUSE
- Se não houver nenhum teste disponível, selecione o ícone **Adicionar amostra (+)**, introduza as informações da amostra, selecione **Criar**, e, em seguida, selecione **Digitalizar**
- Selecione um **scanner** e certifique-se de que a bandeja está aberta (selecione **Abrir bandeja**, se necessário)

06 CARREGAR E DIGITALIZAR A LÂMINA



- Desbloqueie o fixador da lâmina e coloque a **lâmina de vidro** (com a **lamela**) na bandeja de lâminas
- Coloque qualquer etiqueta ou texto no **lado direito** da bandeja de lâminas e bloqueie o fixador da lâmina
- Selecione **Digitalizar lâmina**

07 REVER A DIGITALIZAÇÃO



- Abra os resultados da amostra, reveja as imagens capturadas e selecione exemplos para incluir no relatório
- Adicione eventuais comentários e selecione **Finalizar**
- Selecione o ícone **Visualizar relatório** para visualizar um PDF partilhável ou para rever os resultados num sistema de software ligado ao FUSE

Para o esclarecimento de dúvidas sobre o IMAGYST, contacte a Assistência Técnica do VETSCAN através do número 800-822-2947 ou do e-mail dxsupport@zoetis.com.

MM-09612

zoetis