


ZOETIS DIAGNOSTICS

vetscan Imagyst®

Citologia Masse cutanee e Linfonodi con IA

Guida per l'utente

Con Vetscan Imagyst® ottieni risultati accurati e affidabili dell'esame citologico direttamente in Clinica

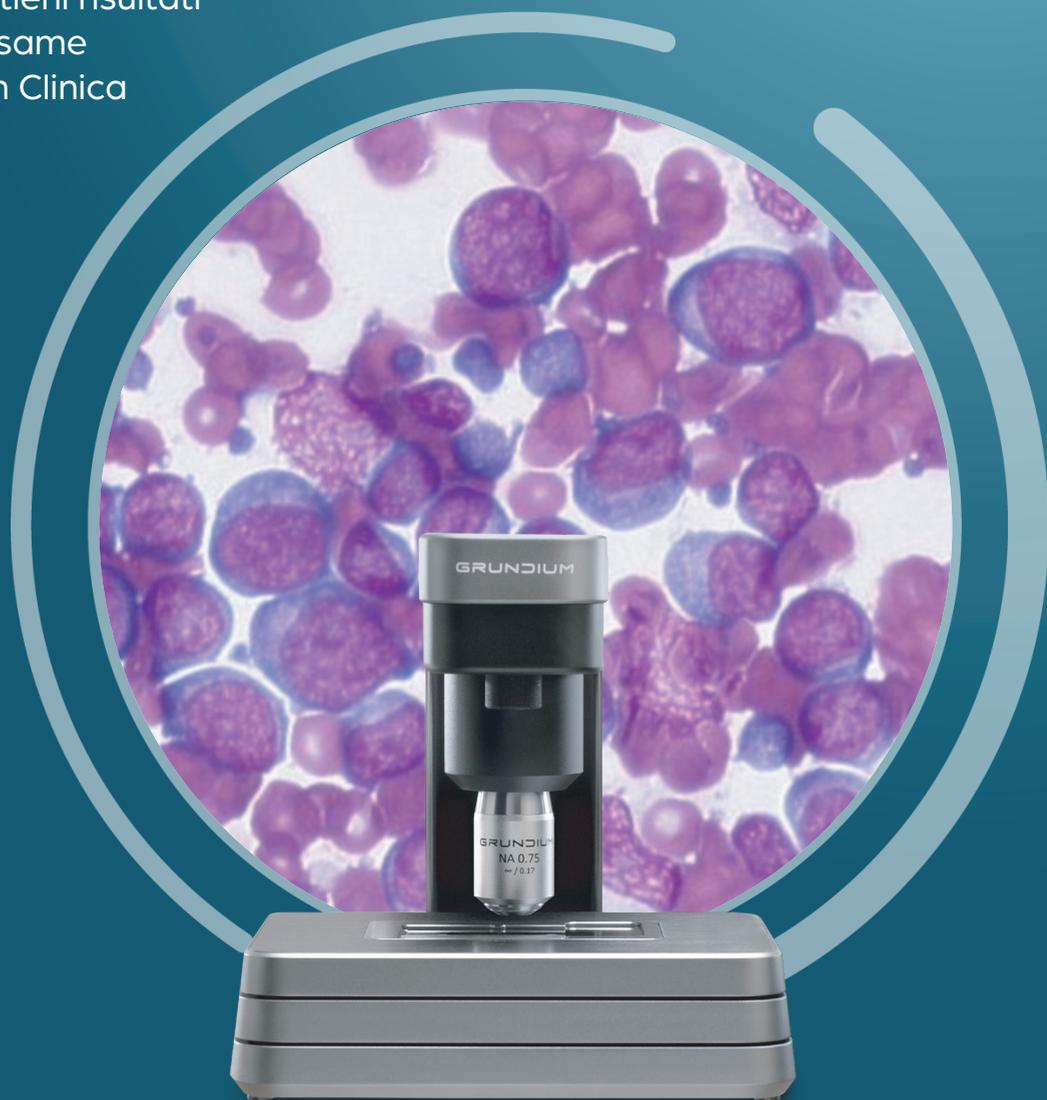

zoetis

Citologia Masse cutanee e Linfonodi, affidabile, accurata e veloce

Prepara il vetrino citologico e grazie a Vetscan Imagyst® Citologia Masse cutanee e Linfonodi con IA ottieni il referto in pochi minuti

1

Prepara il vetrino



- Prepara il vetrino seguendo le indicazioni delle buone pratiche di laboratorio
- Utilizza un **solo vetrino** per ciascuna richiesta
- Scrivi i dati del paziente nell'apposito spazio satinato del vetrino
- Colora il vetrino con una **colorazione tipo Romanowsky (es. Diff Quick™)** seguendo le indicazioni del produttore
- Aggiungi 1-2 gocce di **olio per immersione**
- Posiziona un vetrino **coprioggetto 24x60 mm** sopra il vetrino

2

Aggiungi un nuovo esame



- Accedi a **Vetscan Imagyst®**
- Se **FUSE/HUB** è connesso, scegli l'esame desiderato nella lista degli **ORDINI IN ATTESA**
- Se **FUSE/HUB** non è connesso, seleziona **AGGIUNGI ANALISI (+)**, Inserisci **ID** e nome paziente e seleziona **CREA**
- Seleziona **SCANSIONE**
- Seleziona **APRI VASSOIO**

3

Completa l'anamnesi del paziente



- Indica il **nome del sito**
- Indica il **tipo di campione**
- Indica la **localizzazione**

4

Aggiungi scansione



- Seleziona lo **SCANNER** disponibile
- Seleziona **APRI VASSOIO**
- Apri il meccanismo di blocco del **VASSOIO** e posiziona il **VETRINO** con il lato satinato rivolto a destra
- Chiudi il meccanismo di blocco del **VASSOIO**
- Avvia la scansione

5

Crea l'area di scansione



- Seleziona **ANTEPRIMA** ed esamina l'area di scansione suggerita
- Accetta l'area di scansione suggerita oppure personalizza con gli strumenti di modifica inserendo **fino a quattro aree diverse di scansione**, valutando il tempo previsto di scansione
- Seleziona **CONTINUA** quando si è soddisfatti dell'area di scansione e **CHIUDI**

6


Finalizza l'esame



- Quando il referto è pronto per la lettura seleziona **PRONTI PER L'ESAME**
- Cerca il referto desiderato e seleziona **ESAME**
- Seleziona **FINALIZZA** per generare il **PDF** del referto
- A questo punto il referto si sposta in **CRONOLOGIA ESAMI**
- Seleziona **VISUALIZZA REFERTO** per condividere o stampare il **PDF** del referto
- Invia i risultati per un ulteriore esame da parte di un Patologo clinico diplomato*, se necessario

ESAME AGGIUNTIVO*

Refertazione aggiuntiva da parte di un Patologo clinico diplomato (servizio facoltativo)

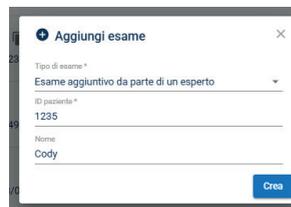

- Seleziona **AGGIUNGI ESAME (+)** per richiedere la valutazione da parte di un Patologo clinico diplomato*
- Seleziona l'esame desiderato
- **ALLEGA** tutte le informazioni/referti/documenti disponibili (PDF, foto, RX, ecc.) per agevolare il Patologo clinico diplomato* nella refertazione
- Seleziona **CHIUDI** e **INVIARE ORDINE**
- Aggiungi l'esame desiderato e seleziona **REVISIONE**

Ordini Esami Incompleti

- Gli ordini di esami incompleti o non inviati vengono visualizzati in **ORDINI IN ATTESA**
- Seleziona **APRI** e completa tutti i campi/informazioni richiesti
- Vedi punti da 3 a 6

*Potrebbero essere applicati dei costi aggiuntivi