


# **vetscan** **IMAGYST**<sup>®</sup>

## **CITOLOGIA DIGITALE**

### **GUIDA PER L'UTENTE**

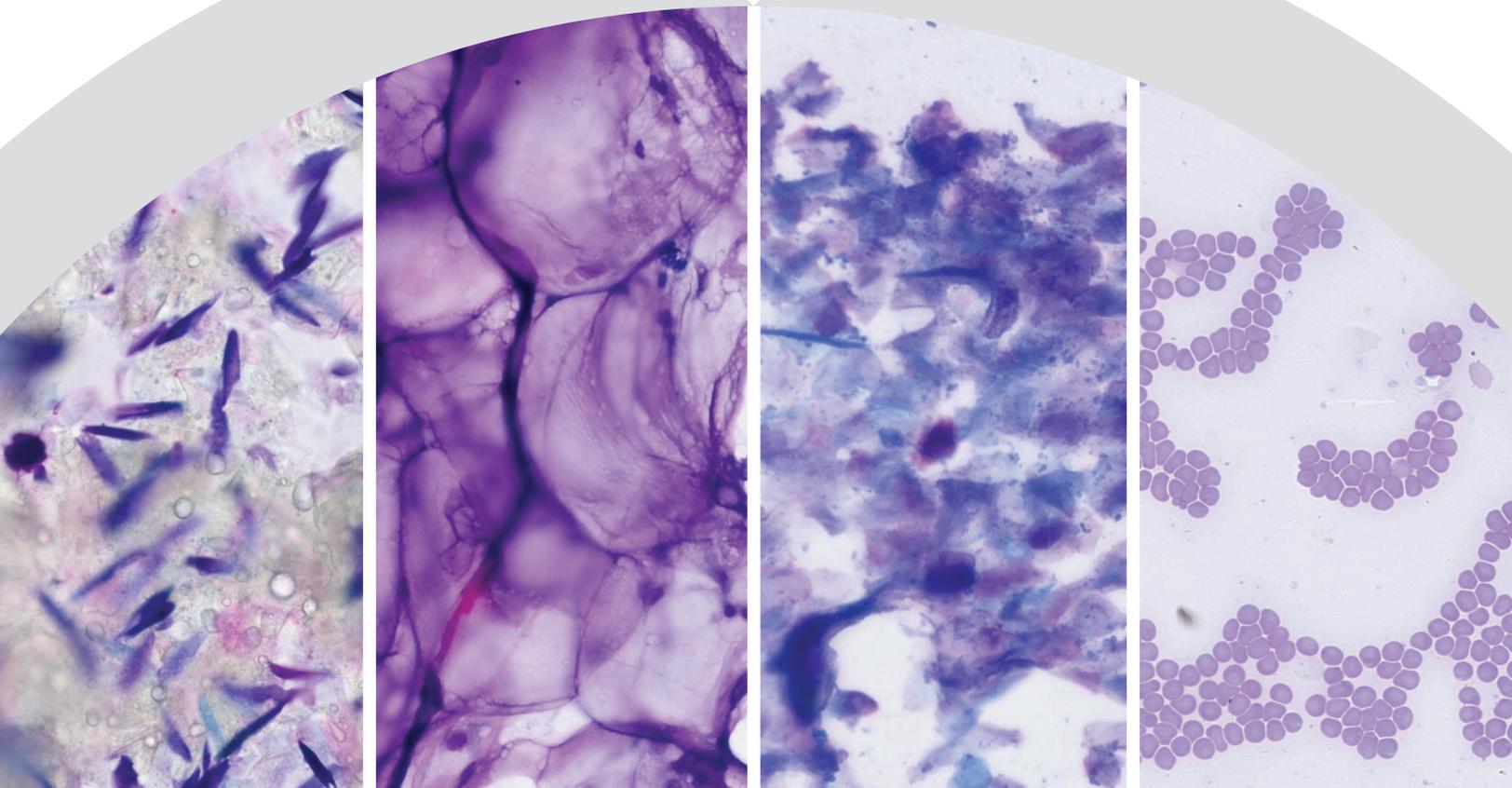

Con Vetscan Imagyst<sup>®</sup>  
ottiene risultati accurati e affidabili dell'esame citologico direttamente in Clinica

# Citologia accurata, affidabile e veloce


Prepara i tuoi vetrini citologici e utilizza Vetscan Imagyst®: per ricevere i referti a cura di Patologi clinici diplomati 24/7

## 01 PREPARA IL VETRINO CITOLOGICO



- Prepara il vetrino seguendo le indicazioni delle buone pratiche di laboratorio
- Scrivi i dati del paziente nell'apposito spazio satinato del vetrino
- Colora il vetrino con una **colorazione tipo Romanowsky (es. Diff. Quik™)** seguendo le indicazioni del produttore
- Aggiungi 1-2 gocce di **olio per immersione**
- Posiziona un vetrino **coprioggetto 24x60 mm** sopra il vetrino

## 02 AGGIUNGI UN NUOVO ESAME

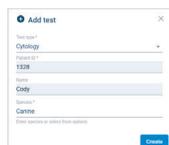

- Accedi a VETSCAN IMAGYST
- Se FUSE o HUB è connesso, scegli l'esame desiderato nella lista degli ORDINI IN ATTESA
- Se FUSE o HUB non è connesso, seleziona **AGGIUNGI ANALISI (+)**, inserisci **ID** e nome paziente e seleziona **CREA**.
- Qualora non sia disponibile alcuna integrazione, selezionare **Aggiungi nuova analisi (+)**
- Seleziona **SCANSIONE**
- Seleziona **APRI VASSOIO**

## 03 COMPLETA L'ANAMNESI PAZIENTE




- Inserisci le informazioni del paziente, specie, razza, età, sesso
- Inserisci le informazioni cliniche del paziente (sintomi, aspetto della lesione, ecc.)
- Seleziona il servizio richiesto:
  - > Citologia Digitale - **Standard**
  - > Citologia Digitale - **Urgente**

## 04 AGGIUNGI LA SEDE DEL PRELIEVO



- Seleziona **AGGIUNGI LIQUIDO** oppure **AGGIUNGI LESIONE**
- Inserisci le informazioni richieste
- Seleziona **CREA**
- È possibile creare fino a 2 diversi siti di prelievo
- Per modificare un sito di prelievo apri e **MODIFICA** una scheda sito
- Per eliminare una sede di prelievo apri una scheda sito e seleziona **ELIMINA (X)**

## 05 AGGIUNGI SCANSIONE

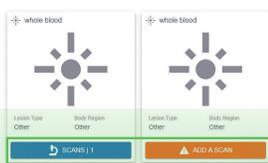

- Seleziona **SCANSIONE** o **AGGIUNGI SCANSIONE** per iniziare una nuova scansione
- Seleziona lo **SCANNER** disponibile
- Seleziona **APRI VASSOIO**
- Apri il meccanismo di blocco del **VASSOIO** e posiziona il **VETRINO** con il lato satinato rivolto a destra
- Chiudi il meccanismo di blocco del **VASSOIO**
- Avvia la scansione"

## 06 CREA L'AREA DI SCANSIONE



- Seleziona **ANTEPRIMA** ed esamina l'area di scansione suggerita
- Accetta l'area di scansione suggerita oppure crea un'area di scansione personalizzata per ridurre il tempo di scansione.
- Seleziona **CONTINUA** quando si è soddisfatti dell'area di scansione
- È possibile inserire fino a 4 vetrini in totale (massimo 2 siti di prelievo diversi)
- Seleziona **ELIMINA SCANSIONE (X)** per rimuovere una scansione

## 07 INVIA LA RICHIESTA



- **ALLEGA** tutte le informazioni/referti/documenti disponibili (PDF, foto, RX, ecc) per agevolare il Patologo clinico diplomato nella diagnosi
- Verifica che il servizio di citologia visualizzato sopra il pulsante **INVIA ORDINE** sia corretto
- Seleziona **INVIA ORDINE**


## 08 FINALIZZA IL REFERTO



- Quando il referto è pronto per la lettura seleziona **PRONTI PER L'ESAME**
- Cerca il referto desiderato e seleziona **ESAME**
- Seleziona **CONFERMA** per generare il PDF del referto
- A questo punto il referto si sposta in **CRONOLOGIA ESAMI**
- Seleziona **VISUALIZZA REFERTO** per condividere o stampare

Lorem ipsum

### ORDINI ESAMI INCOMPLETI

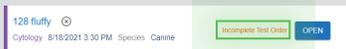

- Gli ordini di esami incompleti o non inviati vengono visualizzati in **Ordini in attesa**
- Seleziona **APRI** e completa tutti i campi/informazioni richiesti
- Vedi punti da 3 a 7

Per ricevere assistenza contatta il tuo Responsabile di zona Zoetis oppure il Supporto Tecnico: tel: +39 06 3366 8100 (opzione 1) - email: dxsupport.it@zoetis.com