

KI Tumor: Schnelle Gewissheit in Minuten

Vetscan Imagyst® identifiziert schnell und zuverlässig häufig vorkommende Veränderungen der Lymphknoten sowie Umfangsvermehrungen der Haut und Unterhaut

1


Objektträger vorbereiten



- Bereiten Sie einen präparierten Objektträger mit einer Färbung vom Typ Romanowski vor. Ein Objektträger pro Auftrag.
- Tragen Sie die Probe in dem Objektträgerbereich auf, der nicht mattiert ist.
- Beschriften Sie den Objektträger eindeutig.
- Tropfen Sie Immersionsöl und legen Sie ein Deckglas von 24 x 60 mm auf.

2


Neuen Test hinzufügen

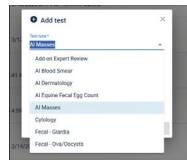

- Melden Sie sich bei Vetscan Imagyst App an.
- Wählen Sie KI Tumor und dann **SCANNEN**.
- Die Patienteninformationen werden von jeder mit HUB/FUSE verbundenen Praxissoftware vorausgefüllt.
- Wenn keine Verbindung vorliegt, wählen Sie **Neuen Test hinzufügen (+)**.
- Geben Sie die Informationen ein und klicken Sie dann auf **SCANNEN/ERSTELLEN**.

3


Probeninformationen vervollständigen

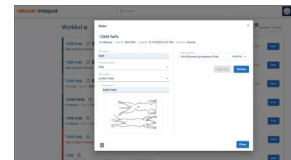

- Geben Sie die Körperregion, die Körperstelle und den Vorbereitungstyp an

4

Objektträger scannen

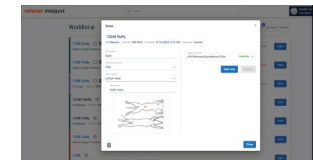

- Wählen Sie einen verfügbaren Scanner aus.
- Wählen Sie **FACH ÖFFNEN** und entriegeln Sie den Objektträgerhalter.
- Legen Sie den Objektträger so in das Fach, dass die Beschriftung nach rechts weist.
- Schließen Sie die Verriegelung.

5


Scanbereich erstellen



- Wählen Sie **VORSCHAU** und prüfen Sie den vorgeschlagenen Scanbereich.
- Akzeptieren Sie den vorgeschlagenen Scanbereich oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Scanbereich.
- Wählen Sie **WEITER** und dann **SCHLIESSEN**.

6


Test überprüfen

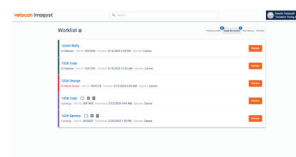

- Finden Sie den Test und wählen Sie **ÜBERPRÜFEN**.
- FINALISIEREN** Sie den Bericht, um ihn zum **TESTVERLAUF** zu verschieben.
- Wählen Sie **BERICHT ANZEIGEN**, um das PDF herunterzuladen oder zu drucken.
- Senden Sie die Ergebnisse für eine zusätzliche Überprüfung durch Patholog*innen ein, falls erforderlich (siehe Zusätzliche Überprüfung durch Expert*innen).

Zusätzliche Überprüfung durch Expert*innen

(Optional; bis zu 3 zusätzliche Objektträger)

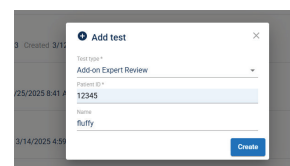

- Wählen Sie **Neuen Test hinzufügen (+)**
- Wählen Sie die Probe
- Fügen Sie Dokumente (.pdf) oder Fotos (.jpeg) zur Krankengeschichte an
- Tippen Sie auf **SCHLIESSEN**, dann auf **AUFTRAG ABSENDEN**
- Finden Sie die gewünschten Tests und wählen Sie **ÜBERPRÜFEN**

Unvollständige Tests

- Neben einem unvollständigen oder nicht abgesandten Test wird im Posteingang **Unvollständiger Testauftrag** angezeigt
- Wählen Sie **Öffnen** aus, um alle Pflichtfelder auszufüllen
- Überprüfen Sie die Schritte 3–6

*Es können zusätzliche Kosten entstehen.

Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Diagnostic Account Manager um Unterstützung zu erhalten.

