


vetscan Imagyst®

Dermatología mediante IA



Guía de preparación de muestras de oído izquierdo y derecho

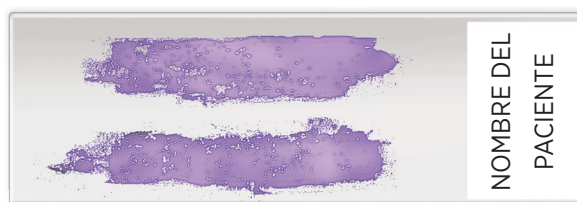

QUÉ HACER



QUÉ NO HACER



Etiquetar los oídos izquierdo y derecho horizontal o verticalmente



Haga rodar suavemente el hisopo sobre el portaobjetos



Añadir 1 o 2 gotas de aceite de inmersión a un portaobjetos teñido



Colocar un cubreobjetos de 24 x 60



Revisar y ajustar el área de escaneo para cubrir el contenido celular



Frotar el hisopo contra el portaobjetos



Crear áreas de muestra gruesas





Usar demasiado aceite de inmersión




Usar calor para fijar



Seleccionar un espacio blanco en el área de escaneo

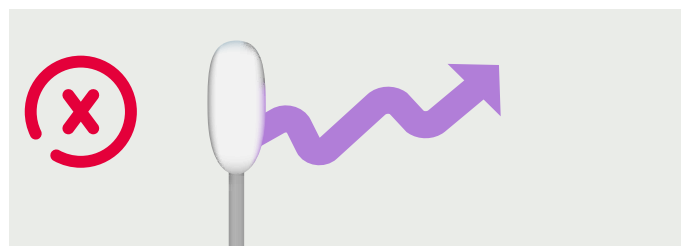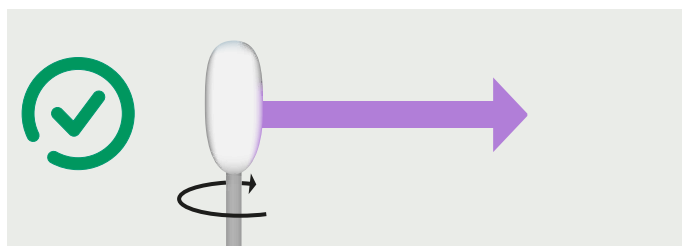

Use las tinciones según las directrices del fabricante.
Cambie las tinciones según las prácticas recomendadas del sector.

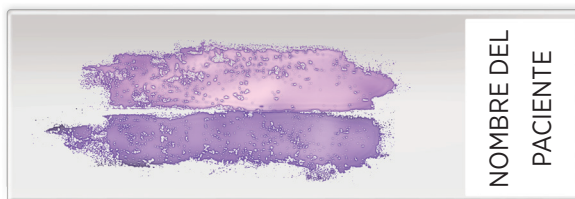vetscan Imagyst®Dermatología mediante IA
Dermatología**Guía de preparación de muestras no auriculares****Hisopado cutáneo****Frotis de impresión****QUÉ HACER****QUÉ NO HACER**

Etiquetar el portaobjetos



Hisopado cutáneo: pasar suavemente el hisopo sobre el portaobjetos en líneas paralelas




Frotis de impresión: presionar el portaobjetos contra la lesión



Añadir 1 o 2 gotas de aceite de inmersión a un portaobjetos teñido



Colocar un cubreobjetos de 24 x 60

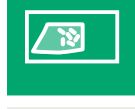

Revisar y ajustar el área de escaneo para cubrir el contenido celular



Hisopado cutáneo: frotar el hisopo de un lado a otro



Frotis de impresión: frotar el portaobjetos de un lado a otro sobre la lesión



Crear áreas de muestra gruesas





Usar demasiado aceite de inmersión



Usar calor para fijar



Seleccionar un espacio blanco en el área de escaneo

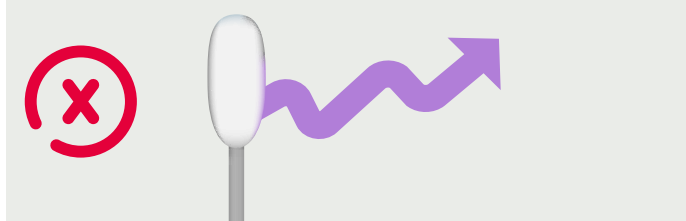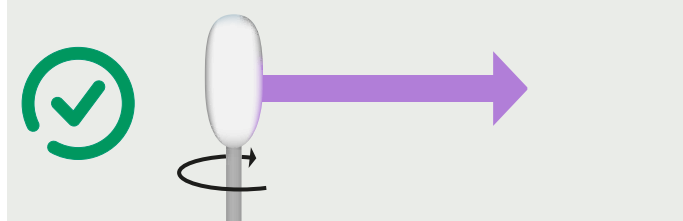

Use las tinciones según las directrices del fabricante.
Cambie las tinciones según las prácticas recomendadas del sector.