


vetscan Imagyst®

Dermatología mediante IA



Guía de preparación de muestras de oído izquierdo y derecho

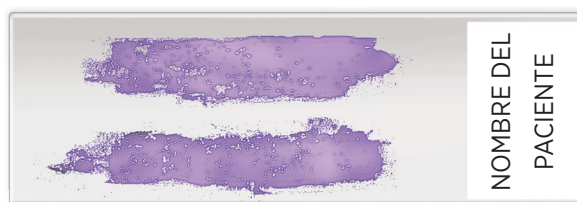

QUÉ HACER



QUÉ NO HACER



Etiquetar los oídos izquierdo y derecho horizontal o verticalmente



Pasar suavemente el hisopo por el portaobjetos



Añadir 1 o 2 gotas de aceite de inmersión al portaobjetos teñido



Colocar un cubreobjetos limpio de 24 x 60 mm



Revisar y ajustar el área de escaneo para cubrir el contenido celular



Frotar el hisopo contra el portaobjetos



Crear áreas de muestra gruesas





Usar demasiado aceite de inmersión



Usar calor para fijar



Seleccionar un espacio blanco en el área de escaneo

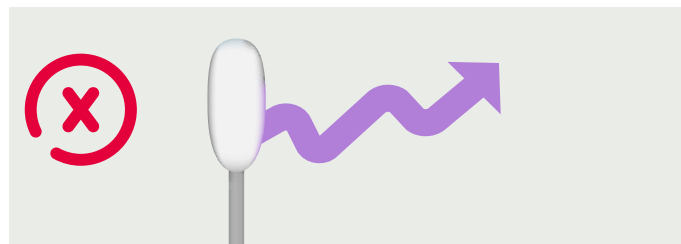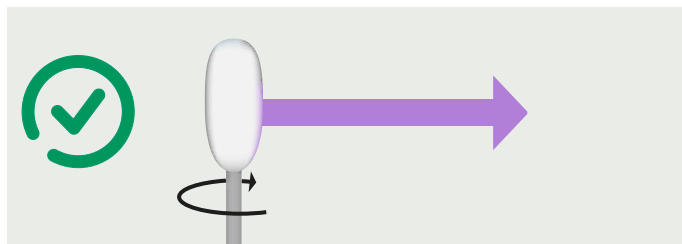

Usa las tinciones según las directrices del fabricante.
Cambia las tinciones según las prácticas recomendadas del sector.


vetscan Imagyst®

Dermatología mediante IA



Guía de preparación de muestras que no son del oído

Hisopo cutáneo

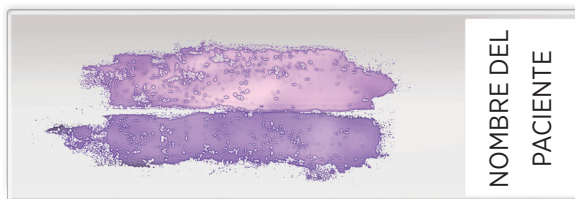

Frotis de impresión



QUÉ HACER




QUÉ NO HACER



Etiquetar el portaobjetos



Hisopo cutáneo: pasar suavemente el hisopo sobre el portaobjetos en líneas paralelas

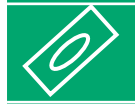

Frotis de impresión: presionar el portaobjetos sobre la lesión



Añadir 1 o 2 gotas de aceite de inmersión al portaobjetos teñido



Colocar un cubreobjetos limpio de 24 x 60 mm



Revisar y ajustar el área de escaneo para cubrir el contenido celular



Hisopo cutáneo: frotar el hisopo de un lado a otro



Frotis de impresión: frotar el portaobjetos de un lado a otro sobre la lesión



Crear áreas de muestra gruesas





Usar demasiado aceite de inmersión



Usar calor para fijar



Seleccionar un espacio blanco en el área de escaneo

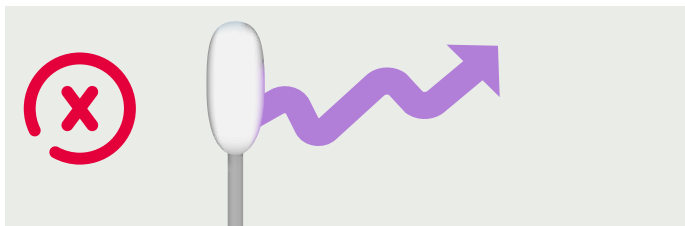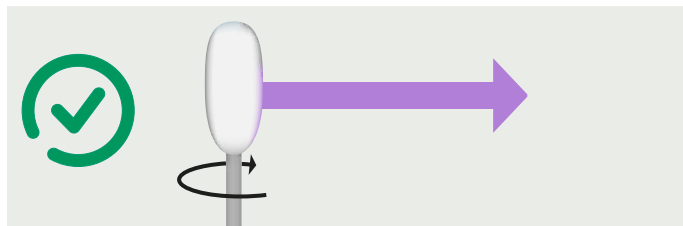

Usa las tinciones según las directrices del fabricante.
Cambia las tinciones según las prácticas recomendadas del sector.